

# Grandes prestaciones y valor añadido

Philips Respironics Pico: mascarilla nasal tradicional

## Guía para ajustar la mascarilla



1

Antes de ponerse la mascarilla, asegúrese de que la almohadilla se ajusta a la anchura de su nariz sin bloquear los orificios nasales.



2

Para desconectar los clips del arnés, gírelos tirando hacia afuera desde la estructura como una llave.



3

Mientras sostiene la mascarilla contra la cara, pase el arnés sobre la cabeza con cuidado.



4

Vuelva a conectar los clips del arnés presionándolos sobre la estructura de la mascarilla.



5

Ajuste las tiras inferiores y superiores tirando suavemente hacia atrás. No apriete en exceso, la mascarilla debe encajarse cómodamente.



6

Para mayor comodidad y sellado, los ajustes finales deben realizarse mientras se está tumbado y con la presión del dispositivo aplicada.

Puede encontrar más información sobre el ajuste en las instrucciones que vienen con la mascarilla.

Si desea más información, visite [www.philips.es/respironics](http://www.philips.es/respironics)

Número de pedido de documento: PN 1120131 MCI 4106468

**PHILIPS**  
**RESPIRONICS**