



La mascarilla facial compacta diseñada para adaptarse a todos los pacientes

La mascarilla Airfit F20 incluye una innovadora almohadilla de silicona InfinitySeal™ probada con las presiones de tratamiento más altas, y diseñada para adaptarse cómodamente a pacientes con cualquier cualquiere fisionomía facial. Está especialmente indicada para aquellos pacientes que buscan una mascarilla menos claustrofóbica y que ofrezca un campo de visión más amplio.

Fácil de ajustar

Según los últimos estudios publicados, la mascarilla AirFit F20 se ajusta al 96,5% de los pacientes.^{1,2,3,4} Eso significa que podrá adaptar a sus pacientes a la terapia desde el principio y enviarlos a casa con confianza.

Sellado resistente

Esta mascarilla cuenta con una almohadilla maleable clinicamente probada para prevenir fugas, acomodarse al movimiento del paciente y proporcionar un sellado resistente incluso con terapias con presiones más altas.

Cómoda de usar

El armazón flexible cubierto de un suave tejido añade comodidad, ofrece estabilidad total y un campo de visión más amplio.



Gracias al diseño InfinitySeal, la mascarilla AirFit F20 se adapta a los contornos faciales únicos de cada paciente, por lo que puede estar seguro de que proporciona una mascarilla con un ajuste seguro y cómodo.



Libertad visual


Permite a los pacientes ver y hacer más cosas desde la cama gracias a un armazón situado bajo los ojos que ofrece una estabilidad integral y un menor contacto facial.

Suave y agradable

El arnés, de una suave felpa, ayuda a asegurar que se ajusta fácilmente y que los pacientes se adaptan al tratamiento de una manera rápida y cómoda.

Ajuste rápido

No necesita ni un minuto para ajustarse AirFit F20.¹ Ponerse y quitarse la mascarilla es cómodo y fácil gracias a los clips magnéticos que conectan el arnés al armazón en cuestión de segundos.

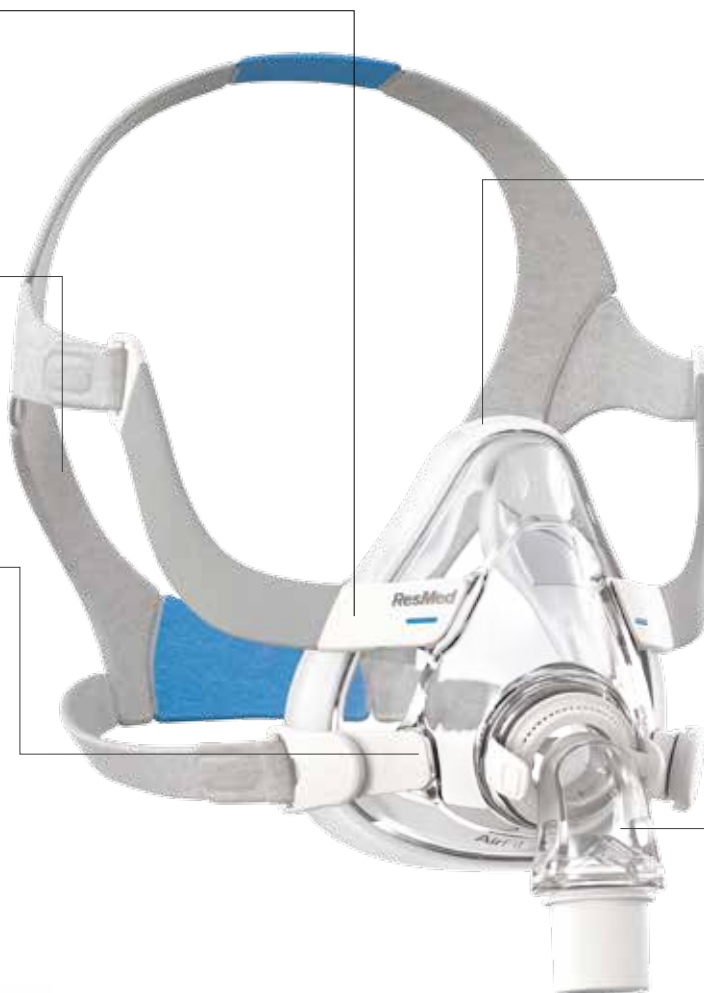

Sellado fiable

Proporciona a los pacientes un sellado fiable y eficaz gracias a la almohadilla de silicona InfinitySeal, diseñada para prevenir fugas, tolerar rechazos y sellar bien bajo presiones variables.

Armazón suave y flexible

Para poder ajustarse a un mayor número de pacientes, el armazón suave y flexible se adapta a diferentes formas de rostro mientras que su acolchado integrado aporta comodidad.

Movimiento y conexión flexible


La función de liberación rápida del codo permite una conexión o desconexión fácil durante la noche, mientras que su capacidad de rotación de 360° permite una mayor libertad de movimiento.




AirFit F20 for Her

Diseñado específicamente para las mujeres, ofrece un tamaño más pequeño para adaptarse a los contornos del rostro femenino.

En estudios internacionales, se reveló que AirFit F20 se ajustaba al 96,5% de los pacientes.^{1,2,3,4}

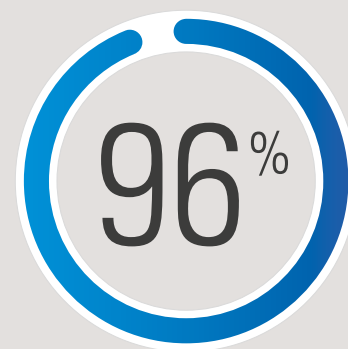

Gracias a la utilización de piezas pequeñas, la mascarilla AirFit F20 es fácil de limpiar y usar

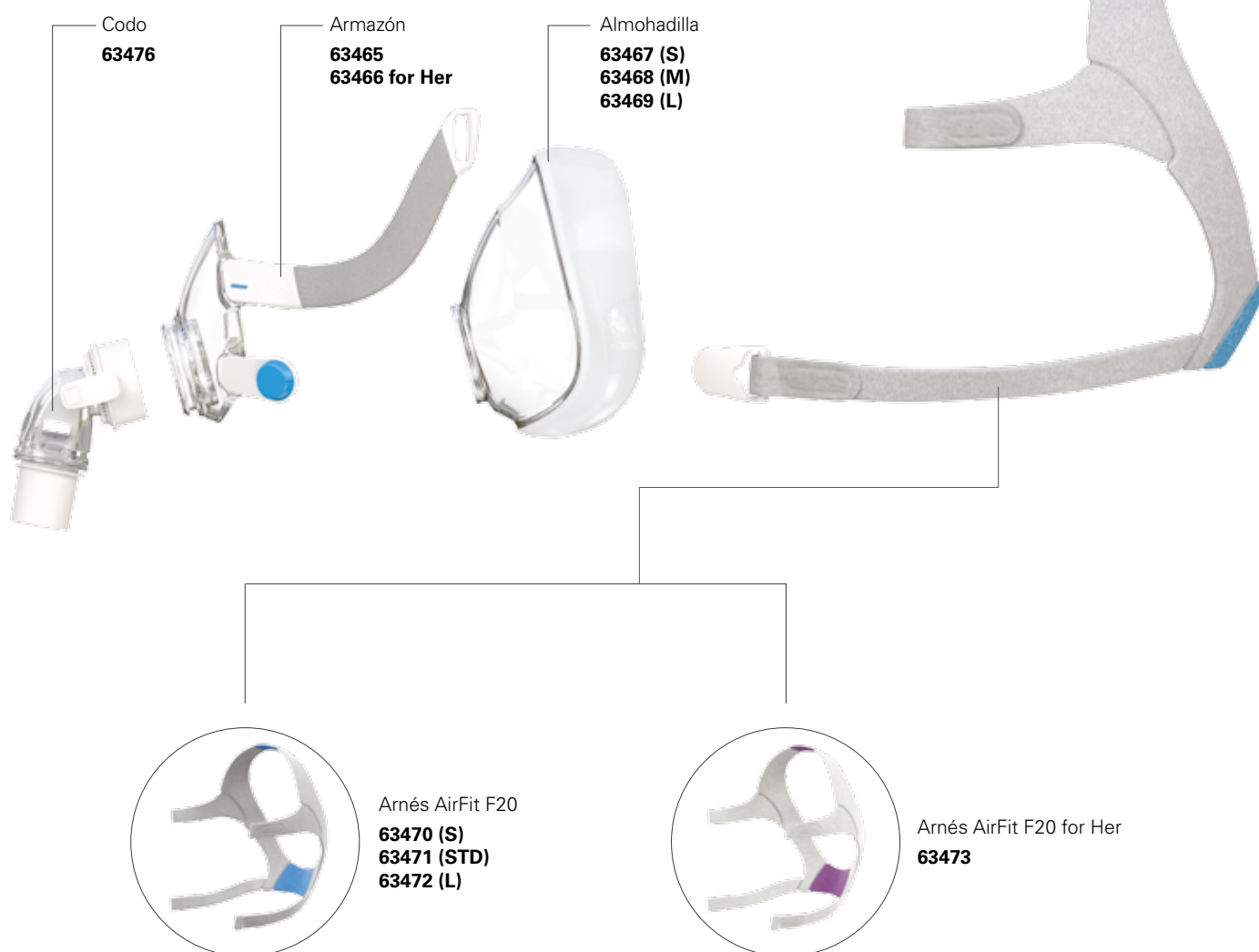


Consejos para elegir el tamaño

La mascarilla Airfit F20 incluye tres tamaños de almohadillas intercambiables: pequeña, mediana y grande. Gracias al diseño modular de Airfit F20 todos los tamaños de almohadilla encajan fácilmente en el mismo armazón, por lo que puede cambiarlas con facilidad para obtener una mayor flexibilidad.

Le recomendamos que consulte la plantilla de ajuste de la mascarilla para medir qué tamaño es el más adecuado para cada uno de sus pacientes.

Puede descargarlo en ResMed.com/AirFitF20

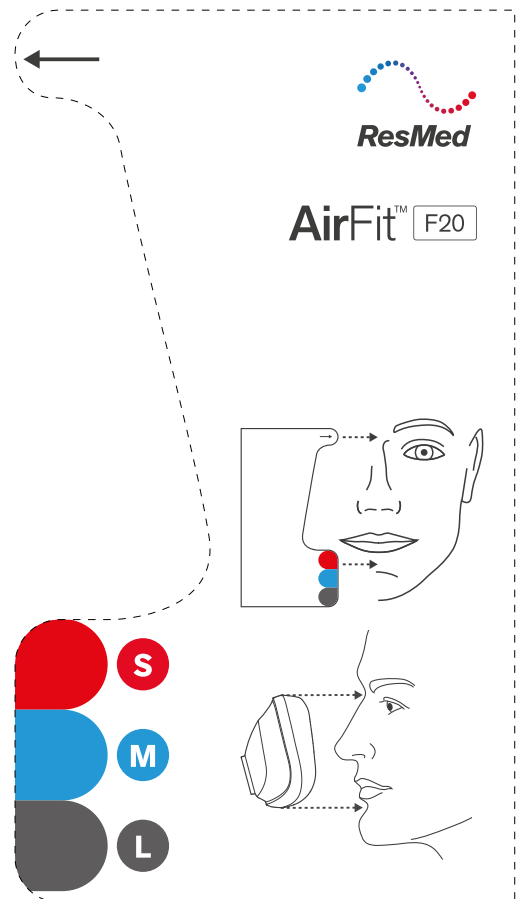


Códigos de producto


	Códigos (EUR3)
AirFit F20: Pequeño	63415
AirFit F20: Mediano	63416
AirFit F20: Grande	63417
AirFit F20 for Her: Pequeño	63418
AirFit F20 for Her: Mediano	63419



El 86% de los pacientes prefieren el sellado de la mascarilla AirFit F20 frente al de la mascarilla facial líder del mercado.¹

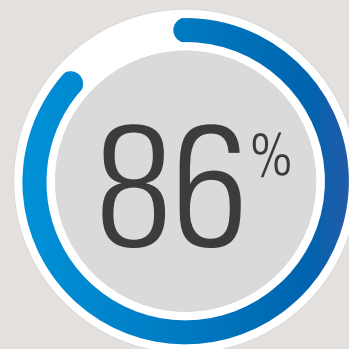

Tecnología de almohadilla evolucionada InfinitySeal: espesor variable para mayor comodidad y estabilidad

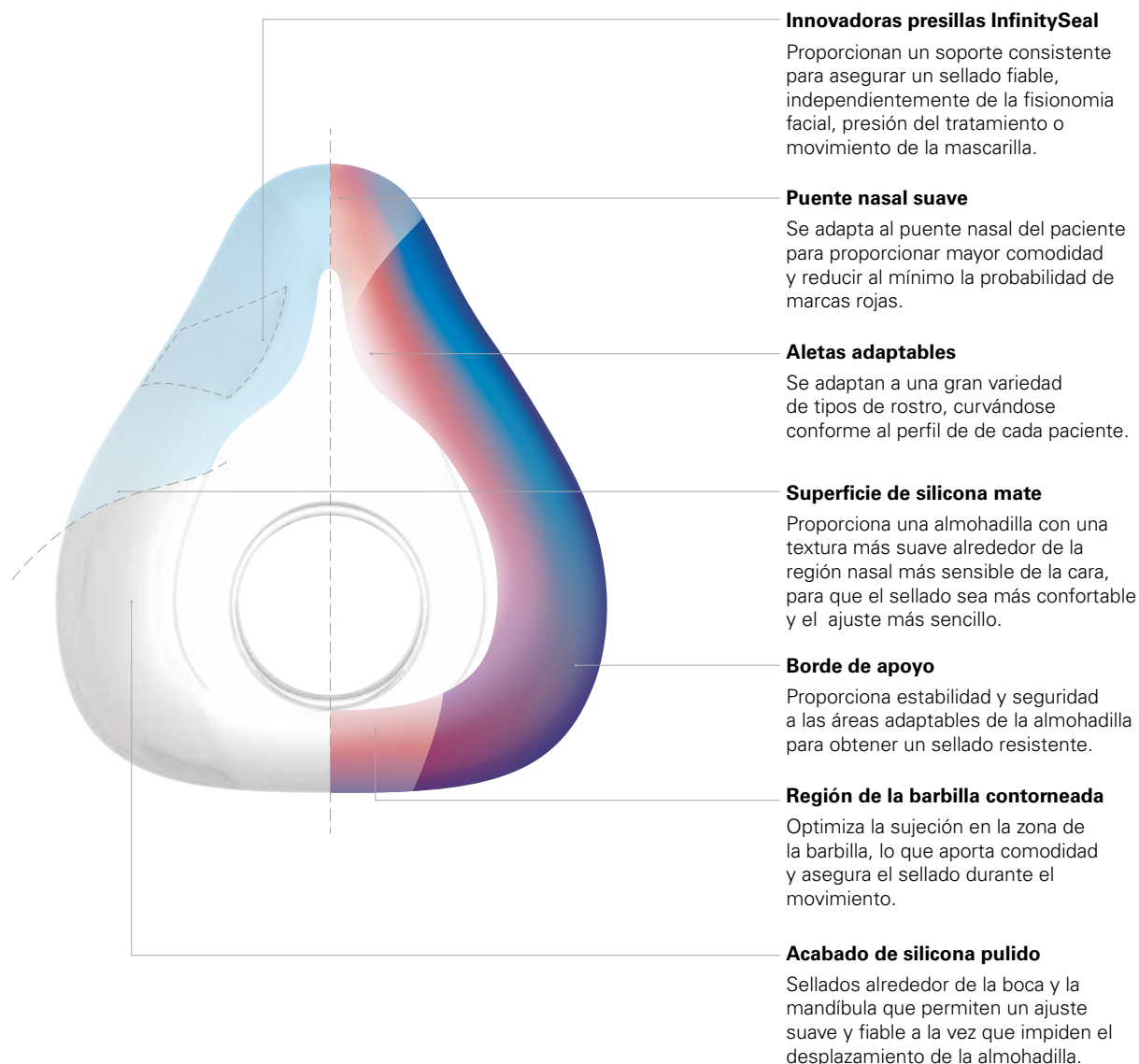

Comodidad Estabilidad



Guía de colocación de AirFit F20



- Asegúrese de que los imanes de las correas inferiores no están conectados.
- Si lo están, suéltelos girándolos y tirando de ellos hacia fuera del armazón.



- Sostenga la mascarilla sobre el rostro, de forma que la parte superior esté alineada con la parte superior del puente de la nariz.
- Coloque el arnés sobre la cabeza haciendo que el logotipo de ResMed mire hacia el exterior.



- Coloque las correas inferiores de manera que ambas queden bajo las orejas.
- Lleve cada uno de los imanes hasta unirlos con su imán correspondiente del armazón.



- Tire de las cintas de ajuste de las correas superiores hasta que sienta la mascarilla nivelada y estable.
- Vuelva a fijar las cintas de ajuste.



- Repita el Paso 4 con las correas inferiores.



- Conecte el tubo de aire del dispositivo al codo y, a continuación, encaje el codo en la parte delantera de la mascarilla.
- Inicie el dispositivo.

Consulte la guía del usuario para obtener más instrucciones.



Opciones adicionales

- El paciente puede colocar la parte inferior del arnés por encima o por debajo del pelo para que se adapte a cualquier preferencia de peinado.

1 Estudio interno de ResMed de 22 pacientes existentes de ResMed realizado entre 26/04/2016 y 27/05/2016 en el que se comparaba la mascarilla líder del mercado con la AirFit F20. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3810791.

2 Estudio de ajuste interno de la AirFit F20 de Resmed en 27 pacientes de ResMed y otros pacientes no pertenecientes a Resmed realizado entre 30/03/2016 y 04/04/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3751086.

3 Estudio de ajuste interno internacional de la AirFit F20 de Resmed en 34 pacientes de ResMed y otros pacientes no pertenecientes a Resmed realizado entre 11/04/2016 y 15/04/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3774922.

4 Estudio de ajuste interno internacional de la AirFit F20 de Resmed en 90 pacientes de ResMed y otros pacientes no pertenecientes a Resmed realizado entre 06/06/2016 y 22/06/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3830701.